


Ottimizzazione del processo di applicazione dei campioni

Per ottimizzare il flusso di lavoro durante l'applicazione di un campione del paziente o di un campione di controllo qualità sulla striscia reattiva, fare riferimento alle indicazioni fornite in questo Bollettino tecnico, che sono coerenti con le istruzioni descritte nel Manuale d'uso di Platform.

Applicazione del campione sulla striscia reattiva

Dopo l'inserimento di una striscia reattiva LumiraDx, il display dello strumento indicherà quando applicare il campione. Applicare **SOLO** una goccia di campione direttamente nell'area circolare di applicazione del campione sulla parte superiore della striscia reattiva.

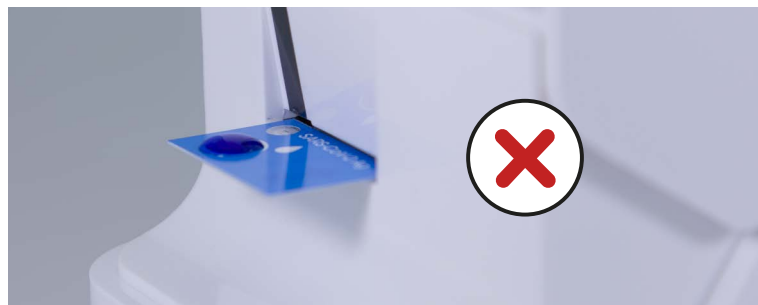

IMPORTANTE: il rilevamento del campione e la conferma sullo strumento possono richiedere fino a **15 secondi** per alcune strisce reattive. In attesa della conferma, **NON** applicare altre gocce di campione. Se si ritiene di non aver applicato correttamente il campione, annullare il test sullo strumento, rimuovere la striscia reattiva e avviare un altro test utilizzando una nuova striscia.

Quando il campione viene rilevato, lo strumento emette un suono (se i suoni sono abilitati) e viene visualizzato un messaggio di conferma.

Il touchscreen dello strumento LumiraDx chiederà all'utente di chiudere lo sportello una volta che lo strumento ha rilevato il campione.

Rimozione della striscia reattiva dallo strumento LumiraDx

Lo strumento richiede di rimuovere la striscia reattiva.

Tirare delicatamente l'estremità dell'etichetta blu della striscia reattiva per rimuoverla e smaltirla.

Non piegare la striscia reattiva quando la si rimuove dallo strumento.



Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Preparazione al test" del Manuale d'uso della Platform per la manipolazione delle strisce reattive, l'inserimento e la rimozione delle strisce reattive e le istruzioni per la raccolta e l'applicazione dei campioni.

Domande frequenti

Cosa devo fare se penso di aver applicato una quantità eccessiva di campione sulla striscia reattiva?

È possibile continuare a utilizzare lo strumento. Esistono controlli integrati per garantire che lo strumento continui a funzionare in modo accurato e sicuro. Estrarre la striscia reattiva con cautela e non piegarla. In caso di dubbi, contattare il Servizio Clienti.

Cosa devo fare se penso di non aver applicato abbastanza campione?

Il rilevamento e la conferma del campione sullo strumento possono richiedere fino a 15 secondi per alcune strisce reattive. In attesa della conferma, NON applicare altre gocce di campione. Se si pensa di non aver applicato correttamente il campione, annullare il test sullo strumento, rimuovere la striscia reattiva e avviare un altro test utilizzando una nuova striscia.

Richieste di informazioni sui prodotti e assistenza tecnica

Per qualsiasi domanda, inviate un'e-mail o chiamate il Servizio Clienti.

Email: customerservices@lumiradx.com

Telefono: per il numero di telefono del Servizio Clienti locale, visitare la pagina Contatti di lumiradx.com.

Copyright © 2024 LumiraDx UK LTD. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo.

LumiraDx e il logo Flame sono marchi di LumiraDx International LTD. I dettagli completi di queste e altre registrazioni di LumiraDx sono disponibili su lumiradx.com/IP. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

I contenuti devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso dei prodotti LumiraDx e in linea con le istruzioni fornite. Non è consentito distribuire o sfruttare commercialmente i contenuti, se non dietro nostra espressa autorizzazione scritta. Non è consentito trasmetterlo o memorizzarlo in qualsiasi altra forma di sistema di recupero elettronico se non per l'uso dello strumento LumiraDx, di LumiraDx Instrument Base o delle strisce reattive LumiraDx. Le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso.

Prodotto da:

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, UK