
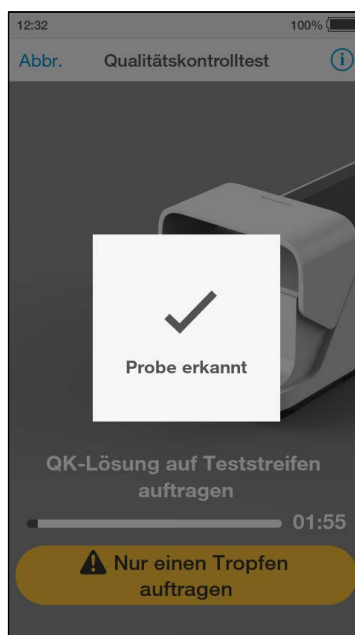


Ablaufoptimierung des Probenauftrags

Für einen optimalen Arbeitsablauf beim Auftragen einer Patientenprobe oder von Qualitätskontrollmaterial auf den Teststreifen beachten Sie bitte die Hinweise in diesem Technical Bulletin, die mit den Anweisungen im Benutzerhandbuch der LumiraDx Plattform übereinstimmen.

Auftragen einer Probe auf den Teststreifen

Nach dem Einführen eines LumiraDx-Teststreifens wird auf dem Display des Instruments angezeigt, wann die Probe aufgetragen werden soll. Tragen Sie NUR einen Tropfen der Probe direkt auf den runden Probenauftragsbereich auf dem Teststreifen auf.

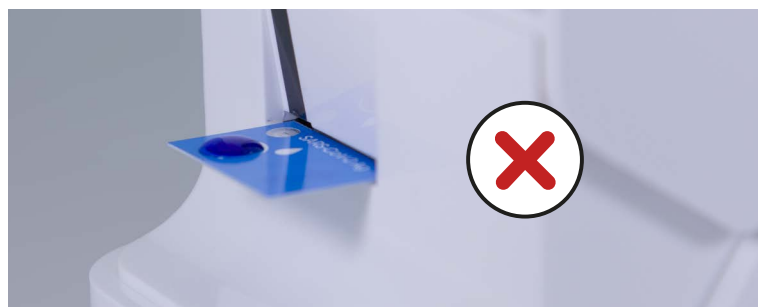

WICHTIG: Die Probenerkennung und -bestätigung durch das Instrument kann bei einigen Teststreifen bis zu **15 Sekunden** dauern. Geben Sie während des Wartens auf die Bestätigung **KEINE** weiteren Tropfen der Probe auf. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Probe nicht richtig aufgetragen haben, brechen Sie den Test am Instrument ab, entfernen Sie den Teststreifen und starten Sie einen neuen Test mit einem neuen Teststreifen.

Wenn die Probe erkannt wird, gibt das Instrument einen Ton ab (sofern Töne aktiviert sind) und eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

Der Touchscreen des LumiraDx Instruments fordert den Benutzer dazu auf, die Tür zu schließen, sobald das Instrument die Probe erkannt hat.

Entfernen des Teststreifens aus dem LumiraDx Instrument

Das Instrument fordert Sie zur Entnahme des Teststreifens auf.

Ziehen Sie vorsichtig am blauen Ende des Teststreifens, um ihn zu entfernen und zu entsorgen.

Den Teststreifen **NICHT** biegen, wenn Sie ihn aus dem Instrument nehmen.



Weitere Informationen zur Handhabung von Teststreifen, zum Einführen und Entfernen von Teststreifen sowie zur Probenentnahme und -anwendung finden Sie im Kapitel "Vorbereitung für den Test" im Benutzerhandbuch der LumiraDx Plattform.

Häufig gestellte Fragen

Was tue ich, wenn ich vermute, dass ich zu viel Probe auf den Teststreifen aufgetragen habe?

Sie können Ihr Instrument weiter benutzen. Es gibt eingebaute Kontrollen, die sicherstellen, dass das Instrument weiterhin genau und sicher funktioniert. Nehmen Sie den Teststreifen vorsichtig heraus und biegen Sie ihn nicht. Wenn Sie Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Was kann ich tun, wenn ich glaube, dass ich nicht genug Probe aufgetragen habe?

Die Probenerkennung und -bestätigung durch das Instrument kann bei einigen Teststreifen bis zu **15 Sekunden** dauern. Geben Sie während des Wartens auf die Bestätigung **KEINE** weiteren Tropfen der Probe auf. Wenn Sie denken, dass Sie die Probe nicht richtig aufgetragen haben, brechen Sie den Test auf dem Instrument ab, entfernen Sie den Teststreifen und beginnen Sie einen neuen Test mit einem neuen Teststreifen.

Produktanfragen und technische Unterstützung

Bitte senden Sie eine E-Mail oder rufen Sie den Kundendienst an, wenn Sie Fragen haben.

E-Mail: customerservices@lumiradx.com

Telefon: Die Telefonnummer Ihres örtlichen Kundendienstes finden Sie auf lumiradx.com.

Copyright © 2024 LumiraDx UK LTD. Alle Rechte weltweit vorbehalten.

LumiraDx und das Flammenlogo sind Marken der LumiraDx International LTD. Alle Einzelheiten zu diesen und anderen Eintragungen von LumiraDx können unter lumiradx.com/IP eingesehen werden. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Der Inhalt darf nur für die Verwendung der LumiraDx-Produkte und in Übereinstimmung mit den bereitgestellten Anweisungen verwendet werden. Sie dürfen die Inhalte nicht verbreiten oder kommerziell verwerten, außer mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Sie dürfen sie auch nicht übertragen oder in irgendeiner anderen Form eines elektronischen Abrufsystems übertragen oder speichern, es sei denn, dies geschieht zum Zweck der Verwendung des LumiraDx Instruments, der LumiraDx Instrument Base oder der LumiraDx Teststreifen. Die bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hergestellt von:

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, UK