

Optimera processen för att tillsätta prov

För det mest optimerade arbetsflödet vid applicering av ett patient- eller kvalitetskontrollprov på Testkortet, se vägledningen i denna tekniska bulletin, som överensstämmer med instruktionerna i Plattform bruksanvisning.

Tillsätta provet till ett Testkort

Efter att du har satt i Testkortet kommer Instrumentets skärm att uppmana dig att **ENDAST** tillsätta en droppe av provet direkt på provappliceringsområdet på ovansidan av Testkortet



NOTERA: Detektering av prov och konfirmering på Instrumentet kan ta upp till **15 sekunder** på vissa Testkort. Medans du väntar på konfirmering, **TILLSÄTT INTE** ytterligare droppar med prov. Om du tror att du inte har tillsatt provet korrekt, avbryt analysen på Instrumentet, ta ut Testkortet och starta en ny analys med ett nytt Testkort

När provet detekteras, ger Instrumentet ifrån sig ett ljud. (Om ljud är aktiverat) och ett konfirmeringsmeddelande visas på skärmen.

Skärmen på LumiraDx Instrument kommer att uppmana användaren att stänga luckan när provet har detekterats.

Vid avlägsnandet av Testkortet från LumiraDx Instrument

Instrumentet kommer att uppmana att ta ut Testkortet.

Dra försiktigt i den blå delen på Testkortet för att avlägsna och kassera.

Viktigt att **INTE** vika eller böja Testkortet när Testkortet tas ut ur Instrumentet.



Ytterligare information gällande "Förberedelse för analys" kapitel i bruksanvisningen för Platform, vid hantering av Testkort, sätta i och ta ur Testkort, provinsamling och applicering av prov.

FAQ

Vad gör jag om jag tror att jag har tillsatt för mycket provmaterial till Testkortet?

Du kan fortsätta använda Instrumentet. Det finns inbyggda kontroller som säkerställer noggrannhet och precision. Ta försiktigt ut Testkortet och var noga med att inte böja Testkortet. Om du känner dig osäker ska du kontakta LumiraDx Kundtjänst.

Vad ska jag göra om jag tror att jag har tillsatt för lite provmaterial?

Provets detektering och konfirmeringstid kan ta upp till **15 sekunder** på vissa Testkort. Medans du väntar för konfirmering, **TILLSÄTT INTE** mera provmaterial. Om du tror att du inte har tillsatt tillräckligt med provmaterial, avlägsna Testkortet och starta en ny analys med ett nytt Testkort.

Produktfrågor och teknisk support

Skicka e-post till eller ring kundservice om du har några frågor.

E-postadress: customerservices@lumiradx.com

Telefon: för telefonnummer till din lokala kundservice, besök sidan Contact Us (Kontakta oss) på lumiradx.com.

Copyright © 2024 LumiraDx UK LTD. Med ensamrätt, i hela världen.

LumiraDx och flam-logotypen är varumärken som tillhör LumiraDx International LTD. Fullständiga uppgifter om dessa och andra registreringar som tillhör LumiraDx finns på lumiradx.com/IP. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Innehållet ska endast användas vid användning av produkter från LumiraDx och i enlighet med de instruktioner som ges. Du får inte, med undantag för om du får vårt uttryckliga skriftliga medgivande, distribuera eller dra kommersiell nytta av innehållet. Du får inte heller överföra det eller lagra det i någon annan form av elektroniskt mottagningssystem än för användning med LumiraDx Instrument, LumiraDx Instrument Base eller LumiraDx Testkort. Informationen kan ändras utan föregående meddelande.

Tillverkad av:

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, Storbritannien