

## Zubehör für den Probenauftrag

Die LumiraDx Plattform ist eine intelligente, portable Plattform, die entwickelt wurde, um die patientennahe Diagnostik zu transformieren. Bei blutbasierten Tests lassen sich patientennahe Tests am effizientesten durch die Probenentnahme direkt aus der Fingerbeere durchführen, anstatt venöses Blut abnehmen zu müssen.

Für den Fall, dass Ihr Arbeitsablauf ein venöse Blutabnahme erfordert, bietet dieses Technical Bulletin eine Anleitung, wie Sie die Probenapplikation so einfach wie möglich durchführen und enthält Beispiele für Probenapplikationszubehör wie Transferröhrchen und Spender.

### Transferröhrchen

Transferröhrchen können in Fällen verwendet werden, in denen ein direkter Probenauftrag vom Finger nicht möglich ist. Spezifische Anweisungen für die Verwendung eines Kapillarröhrchens mit einer Probe aus der Fingerbeere finden Sie in der jeweiligen testspezifischen Gebrauchsanweisung unter [www.lumiradx.com](http://www.lumiradx.com).

Die folgenden Informationen enthalten:

- Erforderliches Probenvolumen des Kapillarröhrchens für jeden blutbasierten LumiraDx Test
- Erforderliche Antikoagulanzen des Kapillarröhrchens für jeden blutbasierten LumiraDx Test
- Bestellinformationen für Kapillarröhrchen, die bei LumiraDx erhältlich sind

LumiraDx Test	Erforderliches Probenvolumen	Erforderliche Antikoagulans für Kapillarröhrchen	Bei LumiraDx erhältliche Kapillarröhrchen
INR	8 µl	Ohne Antikoagulans	L002170101050: Sarstedt Minivette – 10 µl (ohne Antikoagulans – 50 Stück/Packung) oder L002170201050: Sarstedt Minivette – 20 µl (ohne Antikoagulans – 50 Stück/Packung) oder LUM-061665-48: KABE 20 µl (ohne Antikoagulans – 48 Stück/Packung)
D-Dimer	15 µl	Lithium-Heparin	L002170301050: Sarstedt Minivette – 20 µl (Lithium-Heparin – 50 Stück/Packung) oder LUM-061666-48: KABE 20 µl (Lithium-Heparin – 48 Stück/Packung)
CRP	20 µl	Lithium-Heparin	L002170301050: Sarstedt Minivette – 20 µl (Lithium-Heparin – 50 Stück/Packung) oder LUM-061666-48: KABE 20 µl (Lithium-Heparin – 48 Stück/Packung)
NT-proBNP	20 µl	Lithium-Heparin	L002170301050: Sarstedt Minivette – 20 µl (Lithium-Heparin – 50 Stück/Packung) oder LUM-061666-48: KABE 20 µl (Lithium-Heparin – 48 Stück/Packung)
SARS-CoV-2 Ab	20 µl	Ohne Antikoagulans	L002170201050: Sarstedt Minivette – 20 µl (ohne Antikoagulans – 50 Stück/Packung) oder LUM-061665-48: KABE 20 µl (ohne Antikoagulans – 48 Stück/Packung)

Transferröhrchen können zwar direkt bei LumiraDx bestellt werden, wir empfehlen aber auch die lokale Beschaffung von Transferröhrchen, sofern die oben genannten allgemeinen Anforderungen an Antikoagulanzen und Volumen erfüllt sind.

## Blutentnahmeröhrchen Multi Drop Dispenser

Wenn die Entnahme von Blutproben direkt aus dem Finger nicht möglich ist und das Öffnen des Blutentnahmeröhrchens vermieden werden soll, empfehlen wir die folgenden Multi Drop Dispenser.

LumiraDx Test	Erforderliches Probenvolumen	Multi Drop Dispenser	Hersteller	Bestellinformationen
CRP D-Dimer NT-proBNP	Abhängig vom verwendeten Test	U-Pette®	Labcon	7626-500-000-9: U-Pette Bluttransfer-Spender (100 Stck)

Für Produktanfragen und technische Unterstützung bitte den Kundendienst von LumiraDx verständigen.

E-Mail: [customerservices@lumiradx.com](mailto:customerservices@lumiradx.com)

Telefon: 0080058647239

[www.lumiradx.com](http://www.lumiradx.com)

Copyright © 2024 LumiraDx UK LTD. Alle Rechte weltweit vorbehalten.

LumiraDx und das Flammen-Logo sind Marken von LumiraDx International LTD. Vollständige Angaben zu diesen und anderen Eintragungen von LumiraDx sind unter [lumiradx.com/IP](http://lumiradx.com/IP) zu finden. Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Der Inhalt sollte nur für den Gebrauch der LumiraDx Produkte und in Übereinstimmung mit den bereitgestellten Anweisungen verwendet werden. Sie dürfen den Inhalt nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung verbreiten oder kommerziell verwerten. Sie dürfen den Inhalt außerdem nur zum Zweck der Verwendung des LumiraDx Instruments oder der LumiraDx Teststreifen übertragen oder in jeglichem elektronischen Abrufsystem speichern. Die Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Die Produkte sind nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen LumiraDx Vertriebsbeauftragten oder Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit in bestimmten Märkten.

**Hersteller:**  
LumiraDx UK Ltd  
Dumyat Business Park  
Alloa  
FK10 2PB  
GB  
**Registrierungsnummer:**  
09206123

**Bevollmächtigter  
in der Europäischen Union:**  
LumiraDx AB,  
Västra Vägen 5A,  
16961 Solna, Schweden